

**Aus versicherungstechnischen Gründen darf der Spediteur das Ein- und Auspacken des InBodys nicht übernehmen. Dies muss der Kunde vorab selbstständig machen. Der Spediteur holt nur den abholbereiten, verpackten InBody ab.**


01. Schalten Sie den Netzschalter am InBody aus und ziehen danach das Netzkabel ab:




02. Fixieren Sie beide Arme mit Gummis am Standfuß, wie abgebildet:



03. Entfernen Sie die Scharnierabdeckung an der Bodenplatte und lösen alle vier Inbusschrauben mit dem beigegeführten Inbusschlüssel. Die beiden unteren Schrauben müssen so weit geöffnet werden, bis sie aus der Feder herauspringen, ansonsten kann es zu Beschädigungen am Gehäuse kommen. Die beiden seitlichen Schrauben müssen gelöst, dürfen aber auf keinen Fall komplett entfernt werden:

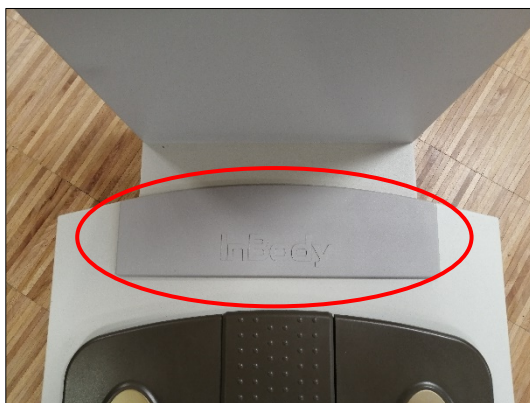

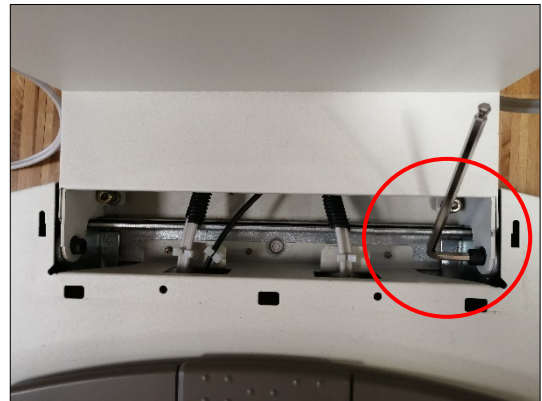

04. Legen Sie nun den mitgelieferten Schaumstoffschutz, wie abgebildet, auf die Bodenplatte und klappen den InBody vorsichtig nach unten:





05. Entfernen Sie jetzt die beiden oberen Schaumstoffabdeckungen aus dem Versandkarton:




06. ...und heben zu zweit, wie abgebildet, den InBody vorsichtig in den Versandkarton:




07. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der InBody richtig herum eingesetzt wird. Das Display muss auf der Kopfseite sein. Dies ist am Versandkarton außen beschriftet (Head):



08. Als nächstes schieben Sie bitte den Schaumstoffschutz, wie abgebildet, nach vorne. Hierzu muss die Säule des InBodys leicht angehoben werden. Danach sollte der InBody sicher in der Polsterung liegen:

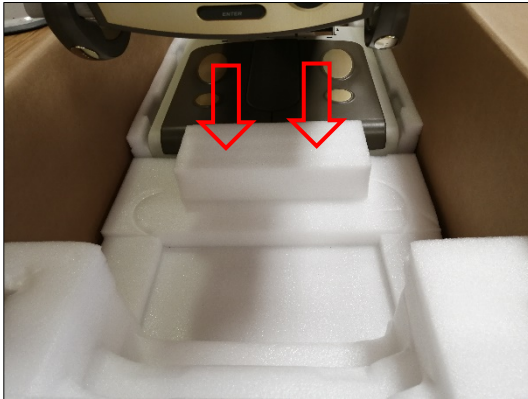

09. Jetzt kann, wie abgebildet, die Scharnierabdeckung samt Inbusschlüssel auf die Rückseite des InBodys abgelegt werden. Das Netzkabel wird seitlich in die Polsterung gesteckt. Danach müssen die beiden oberen Schaumstoffabdeckungen wieder eingesetzt werden:

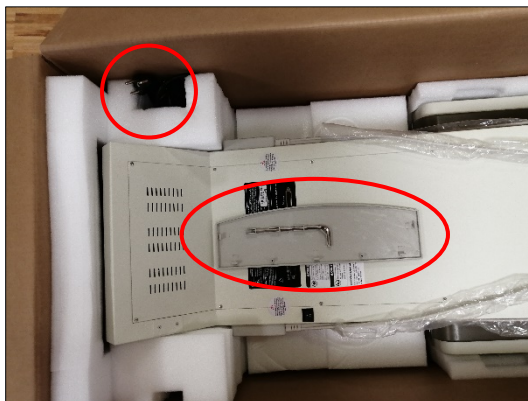

10. Zum Abschluss muss der Versandkarton noch mit Paketklebeband verschlossen werden:





11. Der Transport und die Lagerung des InBodys sollte immer in der Waagerechten erfolgen:



12. Lediglich zum An- und Abtransport darf der InBody kurzzeitig in die Senkrechte gebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass das Kopfteil (ist am Versandkarton mit „Head“ gekennzeichnet) oben ist. Die Sackkarre muss an der Rück- bzw. Unterseite des Versandkartons angesetzt werden:

