

01. Bitte drücken Sie am InBody im Startbildschirm auf das Administrator-Menü:



02. Geben Sie bitte Ihr Passwort (**Standard: 0000**) ein und drücken Eingabe:





03. Als nächstes entfernen Sie, falls angeschlossen, den Drucker vom InBody und stecken den **InBody USB-Datenstick (4 GB, FAT-Formatiert)** in einen der beiden USB-Ports auf der Rückseite des InBodys.




04. Nachdem Sie den USB-Stick gesteckt haben, drücken Sie am InBody fünf Mal in das Feld, in dem **IB770-2.0** steht. Jetzt wird unten im Display eine lange Zahlenkombination angezeigt. Dies ist die installierte Firmware vom InBody:

5 x drücken

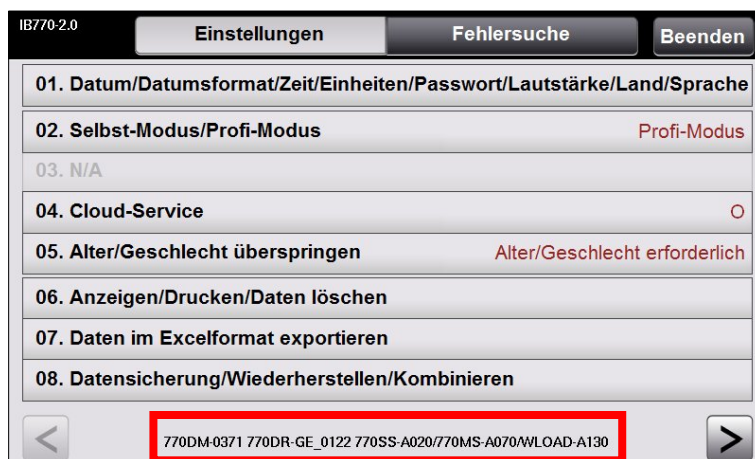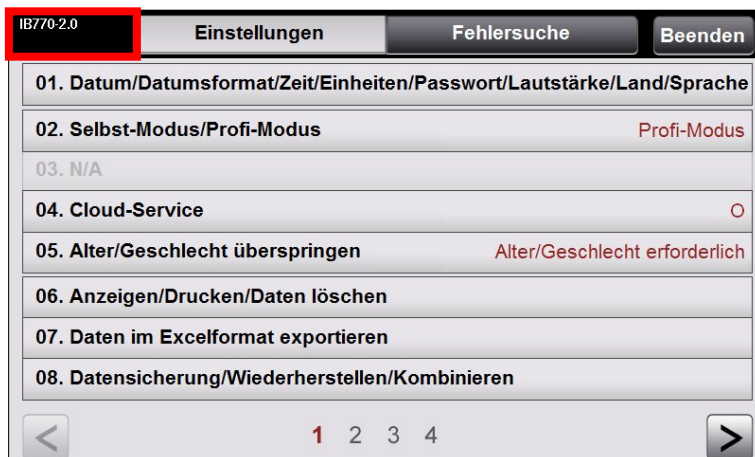


05. Drücken Sie jetzt weitere fünf Mal in dieses Feld. Nun sollten zwei Töne im kurzen Abstand ertönen. Zuerst ein **KLINGELN** und dann einen **GONG**. Der erste Ton signalisiert, dass die Daten übertragen werden und der zweite Ton signalisiert, dass die Übertragung der Daten abgeschlossen ist. Danach können Sie das Administrator-Menü wieder verlassen, indem Sie auf Beenden drücken:

weitere
5 x drücken

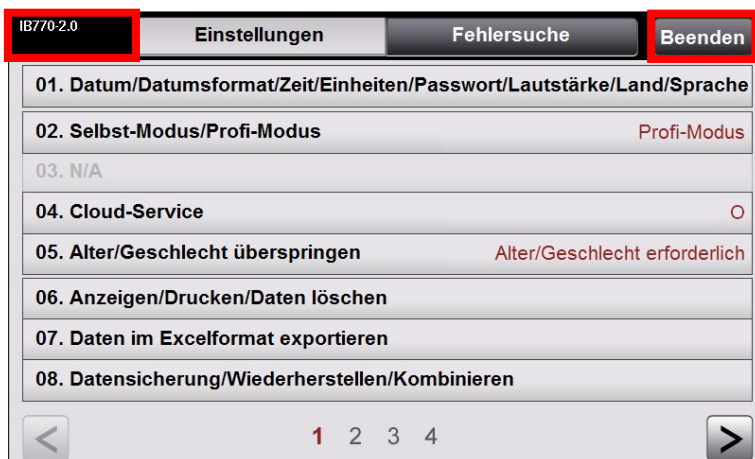

06. Sollte als Erstes **kein KLINGELN** ertönen, sondern ein **GONG**, stimmt etwas mit Ihrem USB-Stick nicht (Größe oder Formatierung) und die Daten werden nicht übertragen. In diesen Fall verwenden Sie bitte einen anderen USB-Stick.
07. Nachdem die Daten auf den USB-Stick übertragen wurden, kann dieser vom InBody wieder abgezogen werden. Auf dem USB-Stick befindet sich nun folgende Datei:
- **qcreport_DatumUhrzeit_SeriennummerInBody** z.B.:
qcreport_20200224170955_I81700410

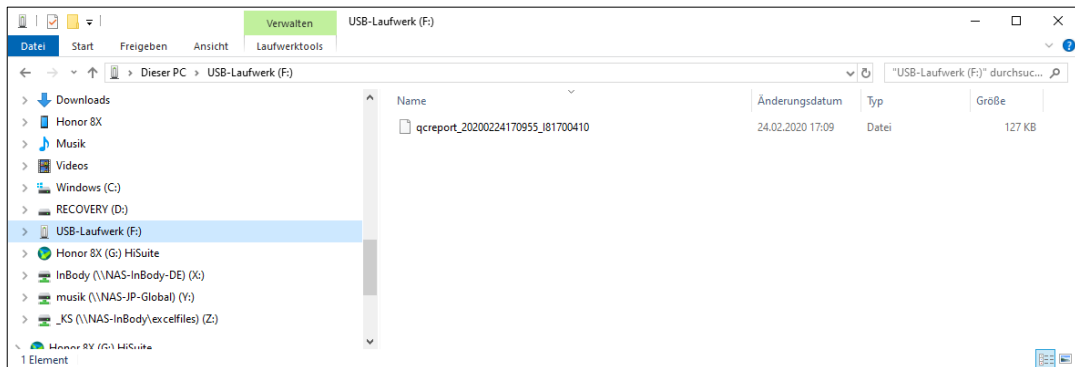

08. Diese Datei senden Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

- support.de@inbody.com

Unsere Mitarbeiter vom technischen Support können daraus viele wichtige Details auslesen und Ihnen dann bei der Fehlerbehebung des InBodys weiterhelfen.

09. Alternativ können Sie den qc-report auch direkt am Drucker ausdrucken. Hierzu schließen Sie anstatt des USB-Sticks den Drucker an einen der beiden USB-Ports auf der Rückseite des InBodys. Bitte stellen Sie sicher, dass sich mindestens 30 Blatt leeres Papier im Drucker befinden. Auch die Druckersprache am InBody muss richtig eingestellt sein. Für den **Samsung Xpress M2026 Drucker** muss **SPL2009-600** eingestellt sein. Wird der **HP Laser 107a Drucker** verwendet, dann muss **SPL2011** eingestellt sein. Ansonsten ist die Vorgehensweise identisch.